

Stručný popis inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentná ponožka Smart Sock™ 2 od Owlet pomocou dvoch senzorov monitoruje životné funkcie bábätka.



Veľkosť 1
0-1 mesiac



Veľkosť 2
1-3 mesiace




Veľkosť 3
3-18 mesiacov



Senzory inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor sníma pulzovú frekvenciu a hladinu kyslíka bábätka.

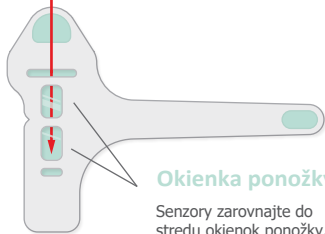

Okenka ponožky

Senzory zarovnajzte do stredu okienok ponožky.



Padne každej nožičke

Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet možno nasadiť na pravú aj ľavú nožičku. Dbajte, aby obrys senzora a senzor na vonkajšej strane nožičky boli za malíčkom, iba tak je ponožka správne nasadená a môže získavať potrebné údaje.





Pravá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na priehlavku.



Ľavá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na chodidle.

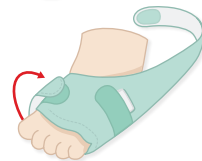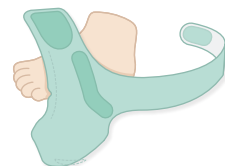

Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku neut'ahujete príliš tesno.

Ak pásik presiahne suchý zips, vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky.

Stručný popis základne

Stačí jediný pohľad na základňu a zistíte, ako sa darí vašmu bábätku

Kontrolka inteligentnej ponožky Smart Sock

Zelené svetlo signalizuje, že inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená k základni.

Registrácia

Pri nastavovaní výrobku vás aplikácia vyzve, aby ste toto tlačidlo jedenkrát stlačili.

Kontrolka Wi-Fi siete

Zelené svetlo signalizuje, že základňa je pripojená k Wi-Fi sieti.

Zapnutie/vypnutie


Ak chcete základňu vypnúť, stlačte ju a uvoľnite. Základňa zapípa a svetlo zhasne.

Stavové svetlo

Svetelný krúžok vás informuje o stave vášho bábätka. Podrobnosti nájdete v aplikácii.

Stlmenie svetla


Stlačením a podržaním základne môžete prepínať medzi jasným denným režimom a tmeným nočným režimom svetla.

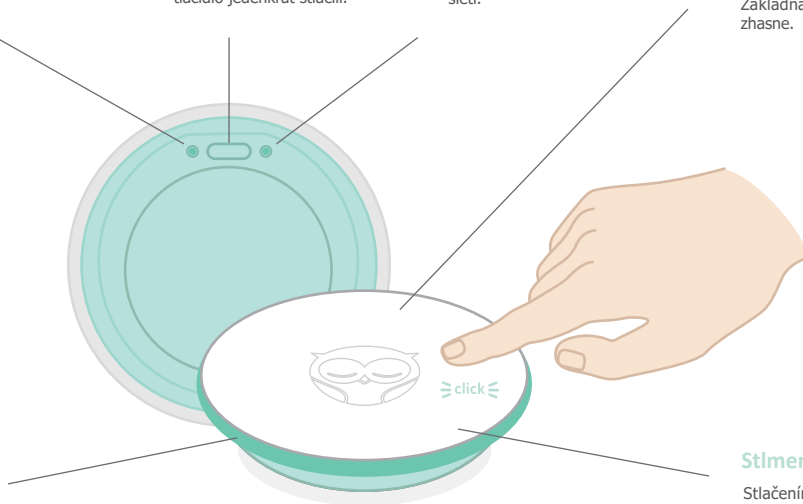

Farby svetla základne


Základňa sa môže rozsvietiť piatimi farbami, ktoré indikujú rôzne stavy, a vydávať zvukové upozornenia. Ak si chcete vypočuť príklady, prejdite do aplikácie.

Stav

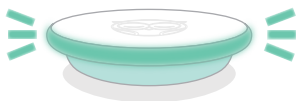


Bliká zeleno

Prvé meranie pulzovej frekvencie a hladiny kyslíka

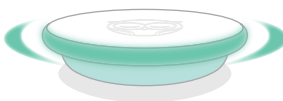

Pomaly pulzuje zeleno


Pulz aj hladina kyslíka sú v norme.

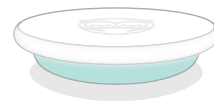

Svieti bielo

Inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená a nabíja sa.


Notifications

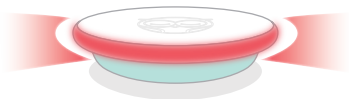

Bliká červeno




Pulz alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

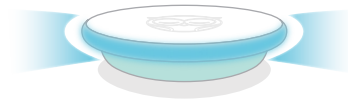

Bliká modro



Inteligentná ponožka Smart Sock je odpojená zo základne.

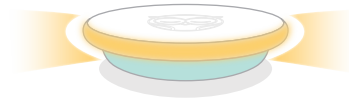

Bliká žltó



Inteligentná ponožka Smart Sock spadla z nožičky, je zle nasadená alebo posunutá.



Owlet

Pre pokojný spánok[®]

Predstavenie výrobku