

Pre aký výrobok je tento návod na používanie určený?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Inteligentná ponožka Smart Sock Plus

Čo nájdete v balení

Ponožky veľkosti 1, 2 a 3, pre každú veľkosť ponožka na pravú aj ľavú nožičku

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Základňa

Kábel základne

Napájací adaptér

Úvodná príručka

* Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.

Ako funguje inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet?



Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock využíva pulzovú oxymetriu na získavanie údajov z nožičky spiacего bábätka. Svetielko ponožky svieti cez pokožku a prietok krvi a hladina kyslíka sa odhaduje na základe toho, koľko svetla zachytí senzor.


Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock zbiera údaje a posiela ich do základne. Na základe týchto údajov vás základňa v prípade potreby upozorní. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

Ako funguje aplikácia

Ak je inteligentná ponožka Smart Sock pripojená k Wi-Fi sieti: Základňa prostredníctvom Wi-Fi siete odosiela informácie na cloud Owlet. Cloud Owlet tieto údaje umožňuje zobrazit' v aplikácii Owlet. Vďaka tomu si môžete všetky údaje prezerať v reálnom čase a dostávať oznámenia z aplikácie, nech ste kdekoľvek.

Režim LAN (lokálne siete):

Ak chcete používať režim LAN, telefón musí byť pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako základňa. Aplikácia pomocou Wi-Fi siete nadviaže počítačové spojenie s cloudom Owlet a bude prijímať údaje, dokým aplikáciu nezatvoríte a dokým nedôjde k zmene Wi-Fi siete aplikácie alebo základne.

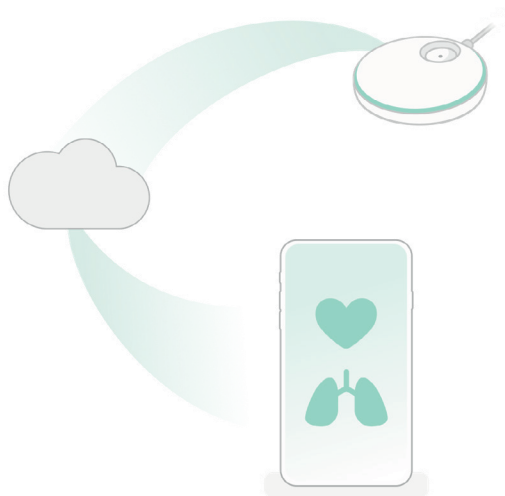

Ako nastaviť a používať inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet.

Požiadavky

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet vyžaduje prístup k iOS alebo Android zariadeniu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Owlet Care. Informácie o minimálnych verziách operačných systémov nájdete v obchode s aplikáciami.

Inteligentná ponožka Smart Sock Plus je vhodná pre deti s maximálnou hmotnosťou 24,9 kg.

Čítanie nameraných hodnôt v reálnom čase, vzdialený prístup k aplikácii a niektoré funkcie aplikácie vyžadujú pripojenie k bezdrôtovej 2,4GHz sieti. Hotspot Wi-Fi siete a 5GHz sieť nie sú podporované.

Ak chcete nastaviť inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet:

① Stiahnite si aplikáciu Owlet.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.



Dobrý deň! Podme založiť účet.

E-mail

Heslo (minimálne 6 znakov)

Znova zadajte heslo

② Založte si účet

Ak si chcete založiť účet, postupujte podľa pokynov aplikácie.



Kto ste?

Meno

Priezvisko

Telefónne číslo

Dátum narodenia

PSČ



Práve vám bol poslaný e-mail
s potvrdzovacím kódom.

Znovu poslať e-mail.



Váš účet bol potvrdený. Vitajte
v rodine Owlet.

Domov >

Pridať profil bábätko alebo zariadenie

Začíname



Viac informácií o inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet >



Máte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Nie >

Áno >

Aké zariadenie chcete nastaviť



Inteligentná ponožka Smart Sock 3 >



Inteligentná ponožka Smart Sock 2 >




Kamera >

③ Nastavte zariadenie

POZNÁMKA: Ak už máte účet Owlet a pridávate ďalšie zariadenie Owlet, postupujte podľa pokynov aplikácie a pridajte nové zariadenie.




④ Základňu pripojte k zdroju napájania a inteligentnú ponožku Smart Sock k základni.

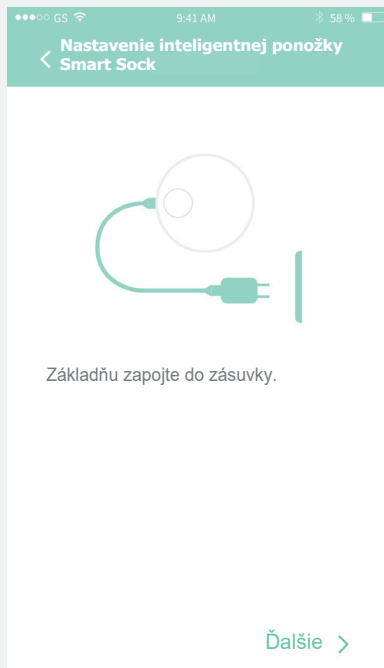


Podľa základňu pripojiť k Wi-Fi sieti, aby ste si údaje mohli zobrazit' v telefóne.

1. Prejdite do nastavenia Wi-Fi siete vo vašom telefóne a vyberte sieť „Owlet“.

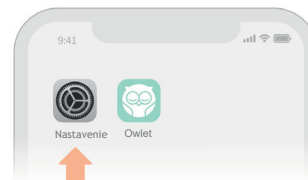

2. Vráťte sa do aplikácie Owlet.

Ak budete presmerovani alebo sa zobrazí správa „Presmerovanie sa nepodarilo“, je to v poriadku! Stačí sa vrátiť do aplikácie Owlet.

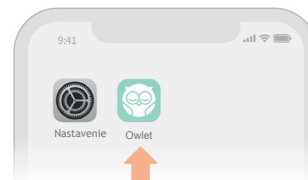

(Táto obrazovka platí iba pre iOS zariadenia.)



Váš účet bol potvrdený.
Vitajte v rodine Owlet!

Domov >

(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)

Podľa pokynov aplikácie môžete pripojiť inteligentnú ponožku Smart Sock k Wi-Fi sieti, zaregistrovať sa a spárovať ponožku a v prípade potreby ponožku aktualizovať.

< Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť.

 Owlet - 383G9f65


(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)

< Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte router Wi-Fi siete.

(Zatiaľ nie je kompatibilný s 5,0GHz sieťami.)

 Wi-Fi sieť Novákovcov

 Wi-Fi sieť vášho suseda s čudným názvom

 Jurský dom

 Kováčovci

Nastavenie Wi-Fi siete

Zadajte heslo k Wi-Fi sieti
Novákovcov.

Heslo

Pripojiť

Nastavenie Wi-Fi siete



Sekundu, pripájam sa
k Wi-Fi sieti...


Nastavenie Wi-Fi siete



Vyzerá to, že Wi-Fi sieť je
pripojená a pripravená!

Teraz zaregistrujeme vaše zariadenie.

Ďalšie >

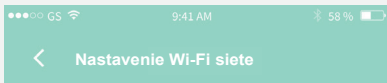


Rýchla kontrola

Pozrite sa na zadnú stranu základne a skontrolujte stav Wi-Fi siete.



Kontrolka Wi-Fi siete nesvieti. >

Kontrolka Wi-Fi siete svieti. >

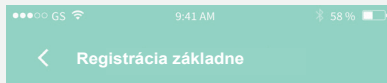



Stlačte a podržte tlačidlo na základni (dokým sa nezvú dve pípnutia).

Registrácia môže po stlačení tlačidla trvať až 10 sekúnd.

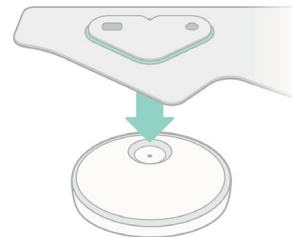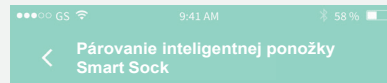

Registrácia prebehla úspešne!

Inteligentnú ponožku Smart Sock pripojte k základni.

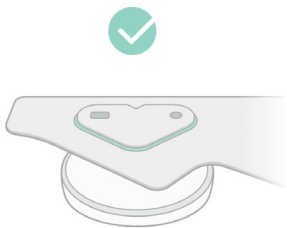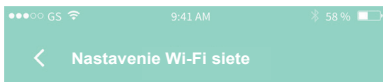

Inteligentná ponožka Smart Sock bola úspešne spárovaná!

Základňa by mala blikať bielo, čo znamená, že inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

Ďalej sa uistíme, že vaše zariadenie je aktualizované.



Aktualizácia inteligentnej ponožky Smart Sock 3

Počas aktualizácie neodpájajte základňu od napájania.



Už to bude...



Dôležité bezpečnostné pokyny

Správne nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Bezpečnosť vášho bábätka je pre nás na prvom mieste a vieme, že aj pre vás.

Uvedomte si prosím, že nesprávne nasadená ponožka môže byť pre bábätko nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otlaky alebo pluzgiere. Nožičku bábätka udržiujte v suchu, používajte ponožku správnej veľkosti a dodržujte naše pokyny pre správne nasadenie ponožky.




Údržba inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock a senzor aspoň jedenkrát týždenne ručne vyperte v jemnom pracom prípravku. Pred ďalším použitím nechajte ponožku úplne vyschnúť.

Zásady bezpečného spánku

Nezabudnite vždy dodržiavať zásady bezpečného spánku a vyhýbať sa nebezpečným plochám na spanie (o. i. hojdačiek, autosedačiek) a spaniu v spoločnej posteli.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet nenahrádza bezpečný spánok ani rodičovskú starostlivosť. Ubezpečte sa, že dodržiavate zásady bezpečného spánku a inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet používate ako pomôcku, ktorá vám okrem starostlivosti, bezpečia a lásky, ktoré sa vášmu bábätku dostávajú, pomôže zistiť, ako sa mu darí.

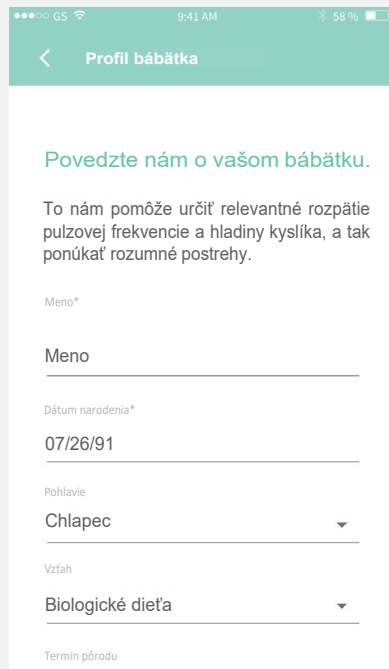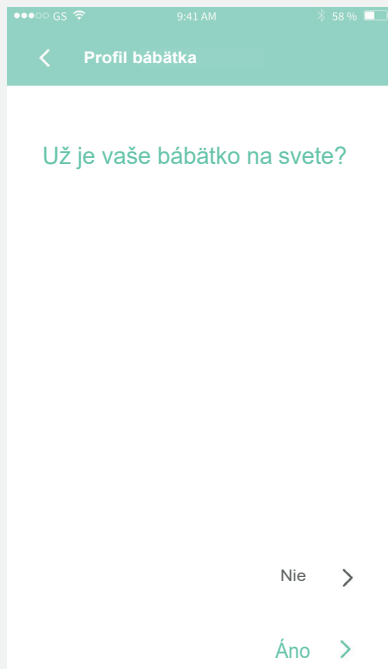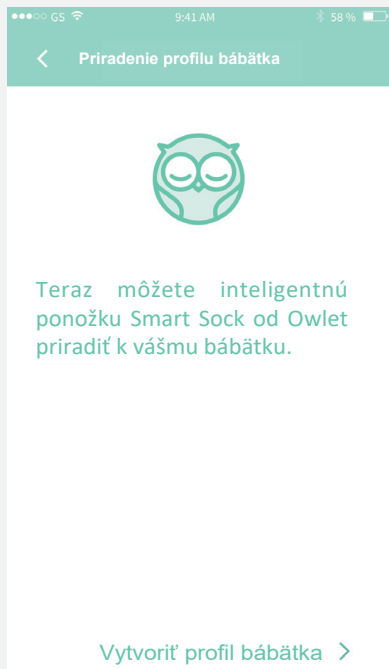

⑤ Vytvorte profil vášho bábätka. Aplikácia vám pomôže vytvoriť profil vášho bábätka a priradiť ho k zariadeniu Owlet.



Profil bábätka



Pridajte fotografiu Tomáška.

Alebo to môžete urobiť neskôr z domovskej obrazovky, ak chcete.


Správna veľkosť inteligentnej ponožky Smart Sock a jej nasadenie

Inteligentná ponožka Smart Sock je dostupná v dvoch veľkostiach a pre každú veľkosť je k dispozícii ponožka pre pravú i ľavú nožičku:

Veľkosť 1 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou do 5,4 kg.

Veľkosť 2 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 5,4 až 13,5 kg.

Veľkosť 3 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 13,5 až 24,9 kg.

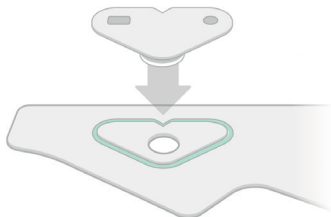

**Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.*



Senzor pripevnite k látkovej ponožke

Obrys senzora zarovnajte s líniou na látke, senzor pritlačte k ponožke, aby sa pripevnil, a zacvaknite ho na miesto.

TIP:

Ak si nie ste istí vhodnou veľkosťou, začnite s menšou ponožkou.



Nasaďte ponožku

Ponožku priložte k boku nožičky tak, aby sa senzor nachádzal za malíčkom.

Pásik zaistite pod prstami nôh, potom pásik členka omotajte okolo zadnej



časti členka a na priehlavku ho zaistíte.

Pri správnom umiestnení by mal pásik na priehlavku smerovať k palcu a senzor by sa mal nachádzať na malíčkovej hrane nožičky bábätka tak, aby hlava sovičky smerovala k prstom.



TIPY PRE POUŽITIE INTELEKTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 NA NOŽIČKÁCH BATOLIAT A DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU:

Batoľatá a deti predškolského veku sú oveľa pohyblivejšie a aktívnejšie ako dojčatá, preto by sme sa s vami chceli podeliť o zopár užitočných rád:

1. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadíte až potom, čo dieťa uložíte do postele, aby v nej čo najmenej chodilo. Pri chôdzi s nasadenou ponožkou sa môže poškodiť senzor.

2. Počkejte, až dieťa zaspí, až potom zapnite základňu. Tak zamedzíte žltým alarmom, ktoré by vás zbytočne upozorňovali na prevaľovanie dieťaťa pri zaspávaní. Základňu môžete zapnúť pomocou aplikácie alebo priamo na jednotke.

3. Ak vaše dieťa inteligentnú ponožku Smart Sock nikdy predtým nenasadilo, môže váhať a klásať vám otázky. Dovoľte mu, aby si predtým, než mu ponožku nasadíte, zariadenie pozrelo a zvyklo si na neho.

Získavanie údajov a oznámení

Prv než si dieťa pôjde zdriemnuť alebo spať, inteligentnú ponožku Smart Sock vyberte zo základne a nasadte mu ju.

Svetlá základne začnú zeleno blikať, čo znamená, že zariadenie sa pokúša snímať hodnoty. Keď základňa začne získavať príslušné údaje, bude pulzovať zeleno.

Žltý alarm

Pri žltom alarme bude základňa stanice blikať žltó, hrať uspávanú a aplikácia vám pošle push oznámenie. Žltá farba signalizuje, že ponožka je zle nasadená alebo spadla z nožičky dieťaťa a zariadenie nedokázalo minimálne 60 sekúnd získať správne údaje.

Modrý alarm

Pri modrom alarme bude základňa stanice blikať modro, hrať uspávanú a aplikácia vám pošle push oznámenie. Modrá farba signalizuje, že ponožka je minimálne 60 sekúnd mimo dosahu základne, upozorňuje na vybitú batériu alebo blokovanie signálu.

Ľudské telo môže rušiť signál medzi základňou a ponožkou. Ak dieťa práve chováte, neotáčajte sa k základni chrbtom, aby ste predišli zbytočným oznámeniam. Ak sa modrý alarm spúšťa opakovane, ponožku a základňu posuňte bližšie k sebe, aby ste predišli opakovaným oznámeniam.

Červený alarm

Červená farba signalizuje oznámenie najvyššej priority. Základňa má k dispozícii tri druhy červených oznámení, pri ktorých bliká červeno a vydáva vysoký zvuk.

Nízka hladina kyslíka: Upozorní vás, ak hladina kyslíka u dieťaťa klesne pod 80 %.

Nízka pulzová frekvencia: Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa klesne pod 60 úderov za minútu a hladina kyslíka klesne pod 85 %.

Vysoká pulzová frekvencia: Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa prekročí 220 úderov za minútu.

TIP:

Ak má dieťa nasadenú ponožku počas kŕmenia, môže sa stať, že spustí červený alarm, lebo pri jedle prirodzene klesá obsah kyslíka a zvyšuje sa pulzová frekvencia.

Zastavenie zvuku oznámení

Zvuk akéhokoľvek aktívneho alarmu môžete krátkym stlačením tlačidla základne alebo pomocou aplikácie na 60 sekúnd zastaviť.

Zastavenie zastaví zvuk základne a aplikácie – svetelný krúžok bude na základni ďalej svietiť a v aplikácii budú k dispozícii podrobnosti. Alarm zostane aktívny, dokým sa stav nevyrieši.

Ak spúšťač (nízka hladina kyslíka, nízka alebo vysoká pulzová frekvencia) počas zastavenia prestane, alarm sa zastaví.

Ak pri zastavení dôjde k spusteniu nového alarmu s rovnakou alebo vyššou prioritou, tento alarm sa spustí bez ohľadu na zastavenie.

Základňa

Základňa inteligentnej ponožky Smart Sock pomocou nasledujúcich farebných svetiel signalizuje rôzne prevádzkové stavy:

Postupne bliká zeleno: Získavanie údajov

Pulzuje zeleno: Hodnoty sú v norme.

Bliká modro: Inteligentná ponožka Smart Sock je mimo dosahu základne, batéria je vybitá alebo niečo blokuje signál.

Bliká žltó: Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená alebo spadla z nožičky.

Bliká červeno: Pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

Pulzuje bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

Svieti bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock je plne nabitá.

Postupne bliká bielo: Inteligentná ponožka Smart Sock nie je spárovaná.

Ako zapnúť monitorovanie a základňu?

Ak sa senzor nabíja, vyberte ho z nabíjacieho portu, alebo stlačte základňu a uvoľnite ju. Po stlačení základne sa ozve pípnutie a základňa sa rozsvieti zeleno.

Ako vypnúť základňu a monitorovanie?

Stlačte základňu a podržte ju, dokým nezhasne zelené svetlo a neozve sa pípnutie.

Nabíjanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock položte na nabíjací port, ktorý sa nachádza na hornej strane základne a ubezpečte sa, že svetlo základne a ubezpečte sa, že svetlo základne svieti bielo.

Úroveň nabitia inteligentnej ponožky Smart Sock

Úroveň nabitia batérie inteligentnej ponožky Smart Sock môžete kontrolovať v aplikácii.



Ak svetlo základne pulzuje bielo, ponožka sa nabíja. Ak svieti bielo, ponožka je plne nabitá.

Upozornenie na slabú batériu inteligentnej ponožky Smart Sock

Ak aplikácia zistí, že batéria inteligentnej ponožky Smart Sock sa za menej ako hodinu vybijie, upozorní vás na to modrým alarmom.


V tomto prípade však základňa nebude vydávať žiadny zvuk ani blikať.

Stav batérie môžete kedykoľvek zobraziť na stavovej obrazovke zariadenia.

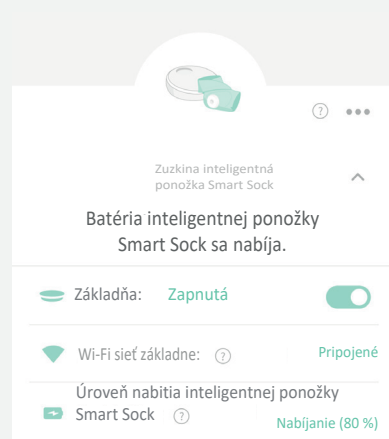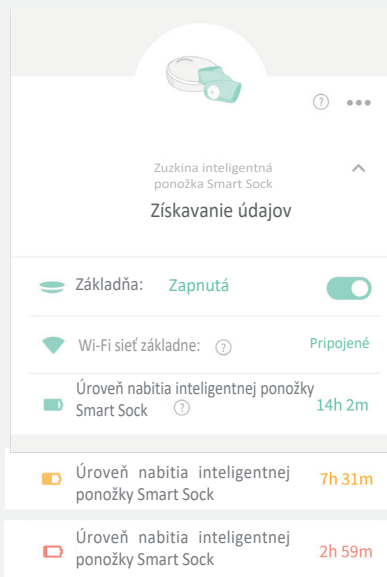

História


Na karte História v aplikácii sa zobrazujú posledné relácie spánku, údaje a alarmy. Základňa a aplikácia vyžadujú pri zobrazení Histórie pripojenie k Wi-Fi sieti.

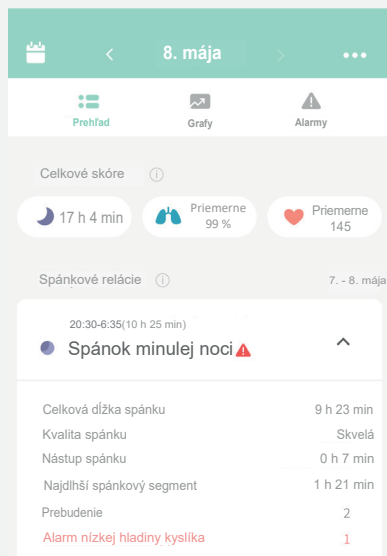

Grafy zobrazujú priemerné hodnoty pulzovej frekvencie, kyslíka a spánku za uplynulých 10 minút a aktualizujú sa každých 10 minút počas každého spánku.



Stiahnutím grafov dolu obnovíte údaje alebo zatvoríte a znova otvoríte aplikáciu. História uchováva údaje o posledných 30 reláciách spánku.

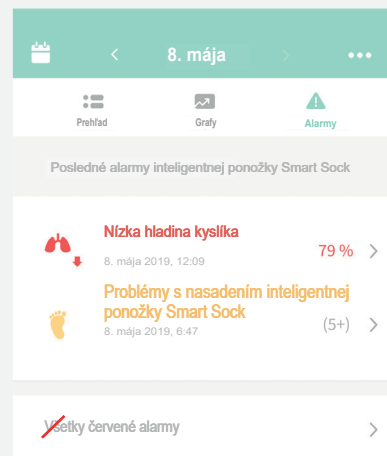

Po prebudení

Keď dieťaťu dáte dolu inteligentnú ponožku Smart Sock, vráťte ju do základne, aby sa mohla nabíjať.

Údržba a skladovanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Druhú inteligentnú ponožku Smart Sock veľkosti, ktorú práve používate, skladujte na ľahko prístupnom mieste, aby ste ponožky mohli pravidelne striedať na oboch nožičkách. Druhú veľkosť si odložte pre budúce použitie.

Spoločnosť Owlet odporúča prať ponožku a senzor minimálne jedenkrát za dva týždne, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky spôsobenému znečistenou ponožkou a senzorom. Ponožku a senzor perte ručne v jemnom pracom prípravku a studenej vode. Pred ďalším použitím ju nechajte úplne vyschnúť.

Ako vypnúť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor vyberte zo základne. Napájací kábel odpojte od základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne zasunúť napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a nezvú sa štyri pípnutia. Stlačte tlačidlo. Svetlo v ponožke zhasne. Ak chcete ponožku opäť zapnúť, senzor vložte do nabíjacieho portu základne.

Tipy a triky

Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Nesprávne nasadená ponožka môže byť pre dieťa nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otlaky alebo pľuzgiere. Ubezpečte sa, že dieťa má ponožku správnej veľkosti: je dôležité, aby ponožka dobre sedela a nebola tesná okolo prstov ani členka. Odporúčame pravidelne striedať pravú a ľavú ponožku.

Ak pokožka nožičky sčervenie, prestaňte na tejto nožičke ponožku používať a používajte ju na druhej nožičke, dokým sčervenenie úplne nezmizne.

Kam umiestniť základňu?

Základňa musí byť v dosahu používanej inteligentnej ponožky Smart Sock, aby nedochádzalo k zbytočnému spusteniu modrého alarmu. Dosah Bluetooth je až 30 m. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

Ako otestovať alarmy

Červený

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Stlačte a podržte základňu, dokým sa neozvú tri pípnutia, potom ju uvoľnite. Ak chcete zastaviť zvuk, znova stlačte základňu, alebo zvuk zastavte v aplikácii. Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte a podržte základňu, dokým svetlo základne nezhasne a nezve sa pípnutie. Následným stlačením základňu opäť zapnite.

Modrý alarm

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Držte senzor a vzdialte sa od základne.

Žltý alarm

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadte na nožičku dieťaťa alebo prst dospelého, dokým zariadenie nezíska údaj. Potom dajte ponožku dolu a chvíľu počkajte. To môže trvať až 60 sekúnd.


Ako zrušiť pripojenie k Wi-Fi sieti

Pomocou základne

Senzor vyberte zo základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne do základne zasunite napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a neozvú sa štyri pípnutia. Potom trikrát stlačte tlačidlo základne. Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti.

Máte doma neposedníka?

Dozeráme na vaše dieťa v každej situácii, ale niekedy sa tak vrtia, že senzor nedokáže získať potrebné údaje. V tomto prípade sa v aplikácii zobrazia kmitajúce nožičky. Pohyb má vplyv na kvalitu získaných údajov, takže namiesto zbytočného upozornenia sa snímania a oznámenia na chvíľu zastavia, dokým sa opäť nezistia kvalitné hodnoty.

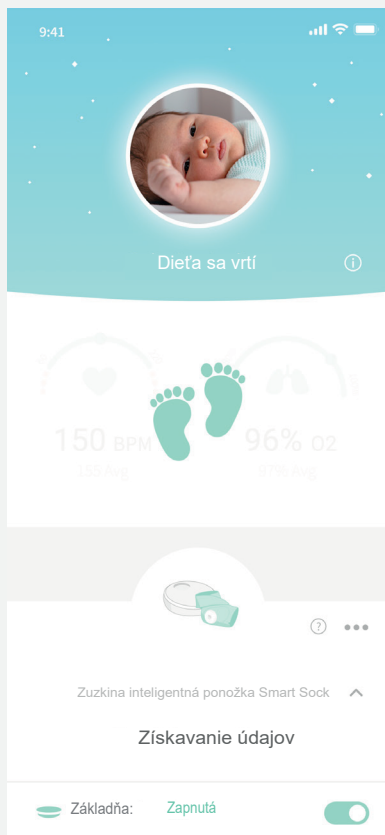


Funguje inteligentná ponožka Smart Sock aj pod detským oblečením?

Inteligentná ponožka Smart Sock je navrhnutá tak, aby sa pohodlne vošla pod pyžamko, zavinovačky a ponožky, a zaistila tak dieťaťu ničím nerušený spánok.

Zdieľanie prístupu k aplikácii

Spoločnosť Owlet pracuje na možnosti pridania viacerých účtov pre zdieľanie prístupu k aplikácii. Ak aplikáciu chcete zatiaľ zdieľať s priateľmi alebo s rodinou, stačí im oznámiť prihlasovacie údaje k vášmu účtu.

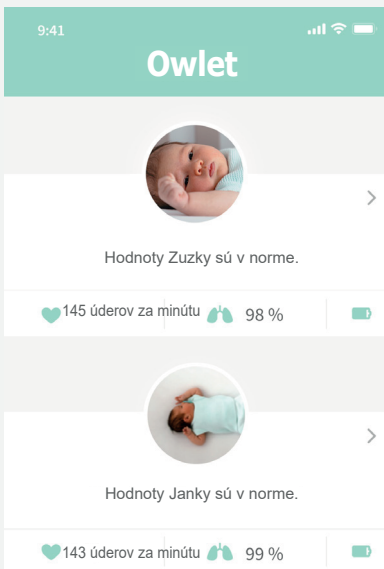

Viac detí? Žiadny problém!

Aplikácia Owlet podporuje založenie niekoľkých detských profilov a ku každému dieťaťu možnosť priradenia ľubovoľného zariadenia. Dbajte, aby každé dieťa malo svoju inteligentnú ponožku Smart Sock a príslušnú základňu, aby v prípade alarmu nedošlo k zámene.

Jas základne

Základňa je vybavená senzorom okolitého svetla a automaticky si upraví jas svetla podľa svetla v miestnosti.

Centrum pre nápoved' a podporu

V aplikácii prejdite do časti Účet > Nápoved' a podpora a kontaktujte náš tím zákazníckeho servisu prostredníctvom chatu v aplikácii, emailu alebo telefónu, alebo prejdite na stránku www.owletcare.sk. Ďalšie tipy a triky nájdete na karte Sprievodca v aplikácii.

Uskladnenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock obsahuje batériu, ktorá sa po dlhšom čase vybije. Ak sa batéria vybije úplne, dôjde k poškodeniu senzora.

6 krokov, ako uložiť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock:

- 1. Senzor plne nabite.**
- 2. Senzor vyberte zo základne.**
- 3. Vypnite ponožku podľa pokynov na strane 46.**
- 4. Odpojte základňu od napájania.**
- 5. Senzor, základňu, káble, zástrčku a inteligentné ponožky Smart Sock uložte na chladné a suché miesto.**
- 6. Každých 6 mesiacov senzor dobite a potom zopakujte kroky 1–5.**



Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: Owlet Smart sock 3

Číslo výrobku:

OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3rd Generation

Popis výrobku: Owlet Smart Sock 3 se skládá ze dvou součástí – základna (OBL) a ponožka se senzorem (OSS). Senzor používá přenos PPG k získání hodnot srdečního rytmu a hladiny kyslíku dítěte nasazením ponožky na nohu. Zařízení je napájeno nabíjecí Li-Ion baterií. Přenáší pomocí pulzní oxymetrie data do základny přes Bluetooth Low energy (BLE). Využívá Nordic nRF52840 IC, které podporuje standardní BLE modifikace a komunikační techniky.

Název zástupce: Obelis S.A

Adresa registrovaného zástupce:

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs

SKVarovanie / Dôležité bezpečnostné pokyny

VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka.

Nie je určená na používanie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmiernenie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je určená pre zdravé deti do veku 18 mesiacov, preto prahové hodnoty oznamovania na inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Majte na pamäti, že: Tento výrobok je určený iba na to, aby vám pomáhal sledovať stav vášho dieťaťa, a nie je určený na to, aby nahradil starostlivosť o dieťa. Ste zodpovední za zdravie a dobré životné podmienky svojho dieťaťa a dodržiavanie zásad bezpečného spánku, zdravia a starostlivosti.

- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter alebo lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet ako náhradu starostlivosti dospelého človeka o dieťa.

Záruka

Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdo stojí. Naše záruky nájdete na webovej stránke: www.owletcare.sk.

Obchodné podmienky

Používanie výrobkov spoločnosti Owlet podlieha podmienkam, ktoré nájdete na webovej stránke: www.owletcare.sk. Používaním výrobku spono-kočnosti Owlet vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na webovej stránke: www.owletcare.sk.

Bezpečnosť

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a dodržujte ich.

PRE BEZPEČNOSŤ VAŠA A VAŠEHO DIEŤA

VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.



VAROVANIE: ZÁKLADNÚ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO ÚŠKRTENIA.

INTELENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLAD Dospelého OSOBY.

U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK OD OWLET S VAŠÍM LEKÁROM.



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu,

a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.

IC: 21386-OBL3A (základňa)

IC: 21386-OSS3A (senzor)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 63 mW)
Bluetooth základne

2 412-2 462 MHz (výstupný výkon 75 mW)
Wi-Fi sieť základne

2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 6,3 mW)

Bluetooth senzora



Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VSTUP: 100-240 V~0,2 A 50-60 Hz

VÝSTUP: 5 V, 1 A



800433

Splňa požiadavky normy UL
62368-1 a CAN/CSA-C22.2 č.
62368-1

Americký patent č. 9,693,730 a 10,449,837.
Prebieha konanie o udelení ďalších
patentov.



Stručný popis inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentná ponožka Smart Sock™ 3 od Owlet pomocou dvoch senzorov monitoruje životné funkcie bábätka.




Vel'kost' 1
0-1 mesiac

Vel'kost' 2
1-3 mesiace



Senzory inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor sníma pulzovú frekvenciu a hladinu kyslíka bábätka.

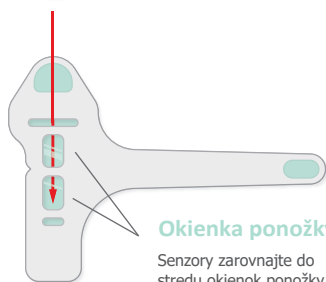

Okienka ponožky

Senzory zarovnajzte do stredu okienok ponožky.



Padne každej nožičke

Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet možno nasadiť na pravú aj ľavú nožičku. Dbajte, aby obrys senzora a senzor na vonkajšej strane nožičky boli za malíčkom, iba tak je ponožka správne nasadená a môže získavať potrebné údaje.





Pravá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na priehlavku.



Ľavá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na chodidle.

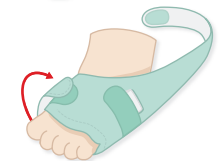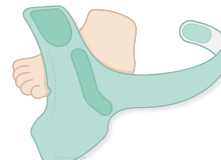

Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku neut'ahujete príliš tesno.

Ak pásiik presiahne suchý zips, vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky.

Stručný popis základne

Stačí jediný pohľad na základňu a zistíte, ako sa darí vášmu bábätku

Kontrolka inteligentnej ponožky Smart Sock

Zelené svetlo signalizuje, že inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená k základni.

Registrácia

Pri nastavovaní výrobku vás aplikácia vyzve, aby ste toto tlačidlo jedenkrát stlačili.

Kontrolka Wi-Fi siete

Zelené svetlo signalizuje, že základňa je pripojená k Wi-Fi sieti.

Zapnutie/vypnutie


Ak chcete základňu vypnúť, stlačte ju a uvoľnite. Základňa zapípa a svetlo zhasne.

Stavové svetlo

Svetelný krúžok vás informuje o stave vášho bábätka. Podrobnosti nájdete v aplikácii.

Stlmenie svetla


Stlačením a podržaním základne môžete prepínať medzi jasným denným režimom a tmejším nočným režimom svetla.

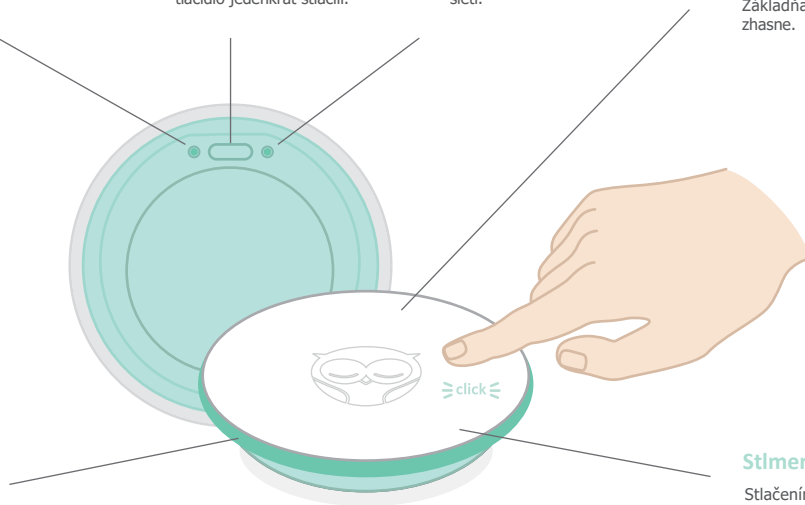

Farby svetla základne


Základňa sa môže rozsvietiť piatimi farbami, ktoré indikujú rôzne stavy, a vydávať zvukové upozornenia. Ak si chcete vypočuť príklady, prejdite do aplikácie.

Stav

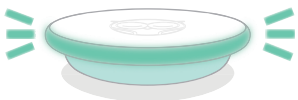


Bliká zeleno

Prvé meranie pulzovej frekvencie a hladiny kyslíka

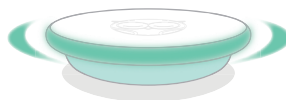

Pomaly pulzuje zeleno


Pulz aj hladina kyslíka sú v norme.

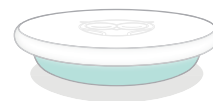

Svieti bielo

Inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená a nabíja sa.


Alarmy

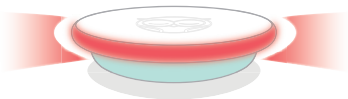

Bliká červeno




Pulz alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

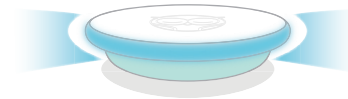

Bliká modro



Inteligentná ponožka Smart Sock je odpojená zo základne.

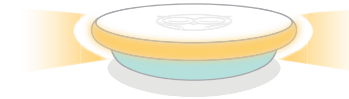

Bliká žltó



Inteligentná ponožka Smart Sock spadla z nožičky, je zle nasadená alebo posunutá.


Začíname

1

Pomocou MicroUSB konektora pripojte elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock k základni.

2

Základňu zapojte do zásuvky. Inteligentná ponožka Smart Sock sa začne nabíjať.

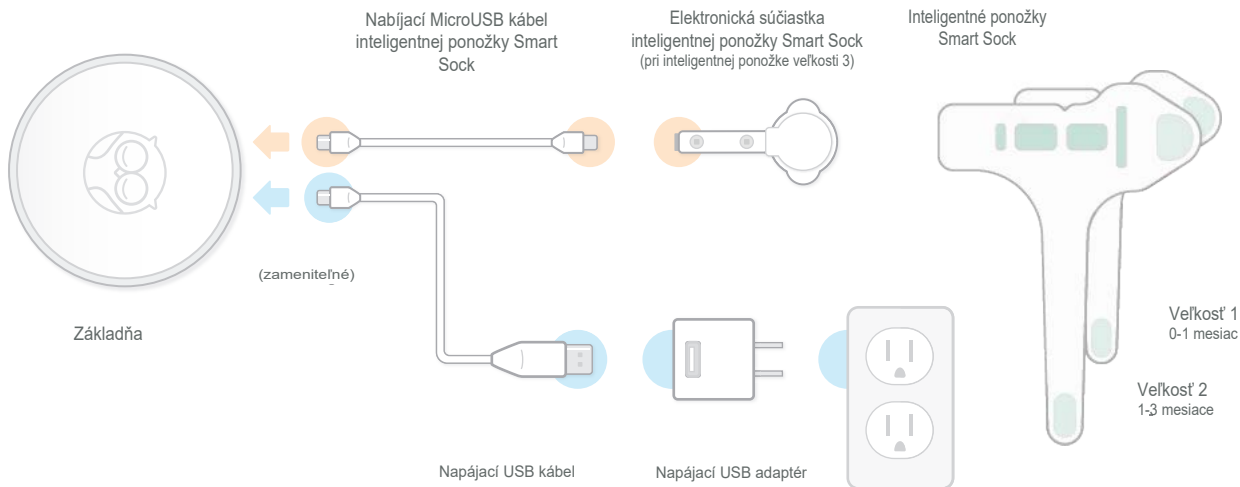


3

Stiahnite si aplikáciu Owlet a nastavte vašu inteligentnú ponožku Smart Sock TM a základňu.

4

Vďaka monitoru Owlet, ktorý vám pomôže postrážiť vaše bábätko, môžete opäť pokojne spať. Základňu používajte ako primárny oznamovací systém a aplikáciu ako sekundárny.

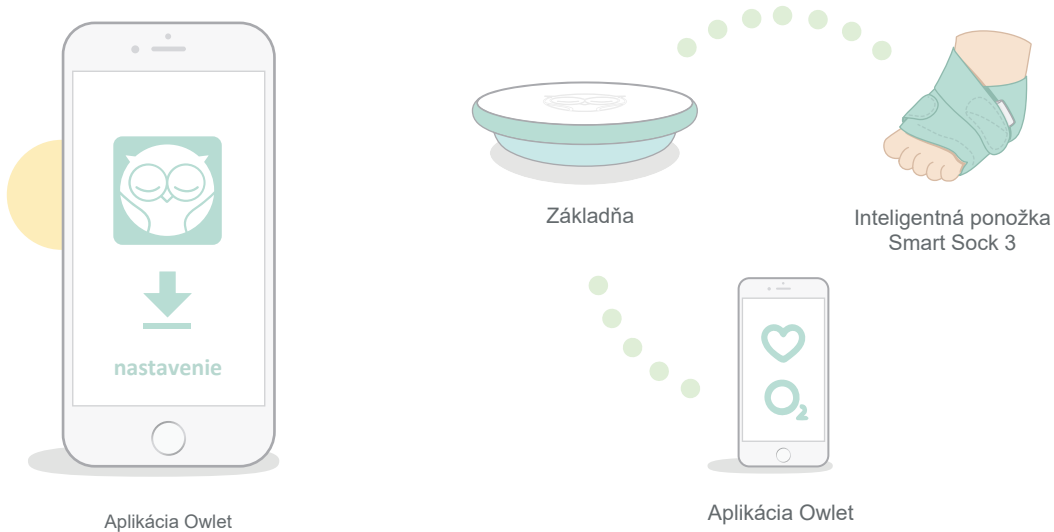

Aplikácia Owlet

Aplikácia Owlet

Informácie záruke

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Owlet zaručuje, že inteligentná ponožka Smart Sock™ 3 od Owlet nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu (2) rokov od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospelé osoby.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!

Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

Inteligentná ponožka Smart Sock 3 od Owlet je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na inteligentnej ponožke Smart Sock 3 od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitoru.

Upozornenie:

- Inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletné informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.sk.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock 3 nie je zdravotnícka pomôcka.



Ponožka Smart Sock 3 od Owlet vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Ponožka Smart Sock 3 je určená pre novorodencov do osemmiest (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemmiest (18) mesiacov. Inteligentná ponožka Smart Sock 3 od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentná ponožka Smart Sock 3:

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmeriavanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNUK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie inteligentnej ponožky Smart Sock 3 od Owlet a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s inteligentnou ponožkou Smart Sock 3 od Owlet. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto inteligentnú ponožku Smart Sock 3 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmto pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese:

info@owlet-care.sk

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADNÚ VŮZDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENAŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.

- INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 3 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠÍM LEKÁROM.
- VŮZDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informácie

email: info@irobot.cz
telefón: +420 245 001 740

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 3.	■ Základňa nie je zapnutá. ■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2. ■ Základňa je mimo dosahu.	■ Základňu zapojte do zásuvky. ■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii. ■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2.4GHz pásmo). ■ Možno máte skrytý router.	■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2.4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2.4GHz sieť). ■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support .
■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	■ Nesprávne heslo ■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. ■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	■ Skontrolujte heslo k vašej sieti. ■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby. ■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti. ■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	■ Prebieha aktualizácia softvéru.	■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
■ Základňu nejde spárovať s mojím účtom Owlet.	■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. ■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet. ■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2.4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@owlet-care.sk

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa blíká modro a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock. Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. Slabá alebo vybitá batéria 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock. Zmeňte polohu bábätko alebo zväzte, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypruete monitorovanie. Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa blíká červeno a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia Nízka hladina kyslíka Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätko je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.) Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Zväzte, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.
<ul style="list-style-type: none"> Základňa blíká žltá a pípa. 	<ul style="list-style-type: none"> Problémy so získavaním údajov Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená. Svetlo v miestnosti je príliš jasné. 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätko je 1-2 mm za maličkom. Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm). Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky. Stimte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> Základňa nie je pripojená k internetu. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera. Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje. 	<ul style="list-style-type: none"> Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia). Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená. Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie. 	<ul style="list-style-type: none"> Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikať. Vypnite a znova zapnite elektronicnú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> Námieslo údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky. 	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje. Bábätko príliš pohybuje nožičkou. Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock Zle padnúca látková ponožka 	<ul style="list-style-type: none"> Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky. Dieťa nedávajte do kolísky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia. Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená. Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo čechraním prevzdušnené predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej postele. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätko, udržanie bábätko na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätku obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- Zvážte, či bábätku počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!